

INTRUÇÕES DE USO

CONNECTORES RWR

Nome Técnico: Outras Partes, Peças e Acessórios

Nome Comercial: Conectores RWR

Descrição Geral

Os conectores são acessórios para uso médico- hospitalar, projetados para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Para uso em geral, desempenham basicamente a mesma função de condutores de gases. Produtos condutores de gases, são utilizados para condução de diversos tipos de gases em várias situações médico-hospitalares.

Fácil manuseio e assepsia.

Fabricados de acordo com as normas ABNT.

Uso indicado apenas para profissionais qualificados.

Características / Composição:

Matéria prima: Polissulfona UDEL P1700 NT 11

Conexões compatíveis com os padrões utilizados no mercado (NBR 13475).

Embalagem:

Os Conectores RWR são embalados individualmente em embalagem plástica e seladas a quente.

Modelos:



Foto ilustrativa dos produtos

Descrição dos Produtos

Código	Descrição
00.0030	Conector em Cotovelo 22 f x 22 m x 15 f
00.0122	Conector em Cotovelo 22 m x 15 f x 15 m
00.0192	Dreno de Rosca p/ Circuito Respiratório
00.0205	Conector em T 22f x 22f x 22m x 15f
00.0945	Conector em Cotovelo p/ Mascara Transparente c/ Furo
00.0266	Conjunto do Ypsilon c/ bocal giratório adulto
00.0268	Conector Reto 22f x 22m x 15f
00.0270	Conector T de Ayres
00.0274	Conector em Cotovelo 22 m x 15 f x 22 m x 15 f
00.0308	Conector Reto 22 m x 15 f x 15 m
00.0309	Conector Reto 15 m x Bico de Ø 7,5 mm
00.0310	Conector Reto 22 f x Bico de Ø 13 mm

Código	Descrição
00.0312	Conector Reto 15 f x Bico de Ø 13 mm
00.0313	Conector Reto 22 m x 22 m x 15f x 15 f
00.0328	Conjunto do Ypsilon c/ bocal giratório infantil
00.0358	Conector Reto 22m x 15f x Bico de Ø 11,5mm
00.0359	Conector Reto 15 m x Bico de Ø 11,5mm
00.0360	Conector reto 22f x bico de Ø 11,5mm
00.0946	Conector em Cotovelo p/ Mascara Transparente s/ Furo
00.0367	Conector Reto 22m x 22f c/ Entrada Lateral Ø 6 mm
00.0462	Conector em Y adulto s/ furo c/ bocal fixo
00.0463	Conector infantil s/ furo c/ bocal fixo
00.0652	Dreno de Encaixe p/ Circuito Respiratório

Indicação

Os conectores são indicados para uso na conexão de mangueiras, tubos e/ou traquéias empregados em circuitos respiratórios ou de aplicação de gás com a finalidade de evitar a perda do gás durante o procedimento médico hospitalar, além de proporcionar agilidade, flexibilidade e facilidade na substituição destes componentes.

Armazenamento e transporte

Durante o armazenamento e transporte proceda da seguinte forma:

- Local seco, fresco e ventilado; não o deixe exposto diretamente à luz do sol.
- Não exponha o produto a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), conserve-o em temperatura ambiente.

Procedimento de Operação

Definir corretamente o tipo adequado de conector a ser utilizado, para facilitar o uso durante o procedimento clínico.

Instruções de Uso

Antes de utilizar, certifique-se de que o conector selecionado está limpo e desinfetado / esterilizado adequadamente;

Ao conectar os componentes dos circuitos respiratórios ou de aplicação de gás, certifique-se que não há vazamentos.

Conecte o acessório a ser utilizado no equipamento seguindo as instruções do fabricante do equipamento.

Para uma nova utilização limpe adequadamente.

Siga o procedimento médico normalmente.

Precauções:

- Não utilize os conectores sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
- Não utilize os conectores se encontrado com vazamento;
- Certifique se os conectores são adequados e que está conectado corretamente;
- Após o uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-lo;
- Só utilize este produto em perfeitas condições, qualquer anormalidade contatar o serviço de assistência técnica RWR;
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada pela RWR;
- A não observância destas precauções será considerado mau uso do produto;
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo do calor e umidade;
- Os conectores não são fornecidos esterilizados, portanto eles devem ser esterilizados antes de seu uso.

Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção Preventiva

Os produtos não são fornecidos esterilizados, portanto eles devem ser esterilizados antes de seu uso.

Lavagem – A lavagem deve ser feita por imersão em solução com detergente enzimático neutro, à temperatura entre 35°C e 65°C, por 10 minutos. O enxágüe deve ser feito com água destilada ou filtrada de forma a eliminar as altas concentrações de cloro e/ou outros contaminantes que possam afetar os materiais.

Desinfecção – Utilizar processo de termodesinfecção, para tanto deve-se acomodar os conectores no equipamento, devendo permanecer por um período de 3 a 5 minutos à 90°C ou de acordo com orientações do fabricante do equipamento.

Esterilização

Esterilização em auto clave: Desmontar as peças conectadas no conector; limpar os conectores individualmente; embalar os conectores e esterilizar separadamente; os conectores devem permanecer dentro da câmara durante 15 minutos à 121°C ou 4 minutos à 134°C.

Não colocar os conectores sem embalagem adequada dentro da câmara.

Não encostar os conectores nas paredes da câmara.

Nota: Não utilizar para limpeza e/ou desinfecção o Fenol (>5%), Cetonas, Formaldeído, Hipoclorito, Hidrocarbonatos clorados, Hidrocarbonatos aromáticos, ácidos inorgânicos e compostos quaternários da amônia.

Cuidados Gerais

Uso indicado apenas por profissionais qualificados em ambiente hospitalar.

Utilize apenas produtos originais RWR.

Estabeleça uma rotina de limpeza e esterilização para os produtos que entram em contato direto com o paciente.

Verifique o perfeito estado de conservação dos produtos, componentes de desgaste normal, que deverão ser trocados periodicamente.

Realizar teste de vazamento antes da utilização.

Advertências e Precauções

- Não utilize o produto sem prévio conhecimento ou supervisão adequada;
- Não utilize o produto se constatado vazamento. Para verificar, pressurize o produto e utilizando água e sabão neutro verifique se não ocorrem bolhas, ou pressurize o produto e utilizando um manômetro de cm H₂O verifique se a pressão não diminui;
- Certifique-se de que o produto é o adequado e que está conectado corretamente;
- Nunca use óleo, graxa, hidróxido ou deixe materiais orgânicos similares em contato com o produto;

- Após uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-lo;
- Não utilize o produto caso haja fissuras ou rachaduras;
- Só utilize o produto em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contatar imediatamente o serviço de assistência técnica RWR;
- Não utilize o produto para qualquer outra função que não a indicada pela RWR;
- A não observância destas precauções será considerada como um mau uso do produto;
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo de calor e umidade.

Atenção

Para sua maior segurança, não instale ou opere o equipamento sem antes ler atentamente as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, consulte a assistência técnica da RWR.

Este equipamento só deve ser operado por pessoas devidamente treinadas. A não observância das regras de segurança poderá causar danos materiais e humanos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), através deste termo de garantia, assegura, como fabricante, ao comprador/consumidor do produto o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, decorrentes de defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da entrega efetiva do produto ao primeiro consumidor. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078/90.

Limita-se a responsabilidade da RWR em substituir as peças defeituosas do aparelho, desde que seu técnico credenciado constate falha em condições normais de uso.

A presente garantia ficará sem efeito se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Obriga-se a RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O comprador-consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pela despesa de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro comprador-consumidor.

A presente garantia somente será válida se devidamente preenchida pela RWR ou pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho, e não apresentar rasuras ou modificações. É necessário ainda, que este certificado seja apresentado juntamente com a nota fiscal a cada solicitação de prestação de serviços de conserto.

TERMO DE GARANTIA		
(Deve ser preenchido pelo revendedor no ato da entrega)		
RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.		
Revendedor	_____	
Modelo e nº de fabricação	_____	
Nota Fiscal nº	_____	
Adquirido por	_____	
End:	_____	Nº _____
Cidade	_____	Est. _____ Cep: _____

Fabricado e Distribuído no Brasil por:

RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda
 Av. do Taboão 3417 - Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09656-000
 Tel.: +55 11 3465-5400
 E-mail: rw@rw.com.br
 CNPJ: 08.441.496.0001-40
 Responsável técnico: Gerson Potonyacz - CREA 5063101610
 Prazo de validade: Indeterminado
 Registro na ANVISA nº: 80412230030