

INTRUÇÕES DE USO
MÁSCARA COM COXIM INFLÁVEL RWR

Nome Técnico: Máscara

Nome Comercial: Máscara com coxim inflável RWR

Características:

Máscara facial destinada ao uso em oxigenoterapia, anestesia e outros. Com formato anatômico e em diversos tamanhos as Máscaras se adaptam facilmente a face do paciente. Máscaras reutilizáveis.

Composição:

PVC, policarbonato e silicone.

Embalagem:

As máscaras são fornecidas embaladas e seladas individualmente em embalagem plástica.

Modelos:

Máscara com coxim inflável



00.0244 - Mascara facial infantil / recém nato c/ coxim inflável;

00.0245 - Mascara facial adolescente c/ coxim inflável;

00.0246 - Mascara facial adulto c/ coxim inflável;



00.0558 - Mascara facial adulto c/ coxim inflável;

00.0559 - Mascara facial adolescente c/ coxim inflável;

00.0560 - Mascara facial infantil c/ coxim inflável;

00.0656 - Mascara facial recém nato c/ coxim inflável;



00.0112 - Mascara transparente infantil c/ coxim inflável;

00.0113 - Mascara transparente adolescente c/ coxim inflável;

00.0114 - Mascara transparente adulto c/ coxim inflável.

Indicação

As Máscaras são utilizadas nas atividades relacionadas a gasoterapia e anestesia em geral, auxiliando na administração dos gases.

Especificações Técnicas

- Conexões compatíveis com os padrões utilizados no mercado (NBR 13475).

Armazenamento e transporte

Durante o armazenamento e transporte proceda da seguinte forma:

- Manter em local seco, fresco e ventilado; não o deixe exposto diretamente à luz do sol.
- Não exponha as máscaras a temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas, quanto muito baixas), sob pena de degradação das partes.

Instruções de Uso

1. Remova a máscara da embalagem e verifique se a pressão do coxim está adequada.
2. Para ajustar a pressão do coxim, insira uma seringa padrão na válvula. Infe ou esvazie para obter a pressão desejada.

3. Inspeção o coxim, certificando-se da inexistência de vazamentos. Se houver vazamento, troque a máscara.
4. Os suportes para presilha estão na máscara.

Siga o procedimento médico normalmente.

Precauções:

- Não utilize a máscara sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Não utilize a máscara se encontrar algum vazamento.
- Certifique-se a máscara é adequada e que está conectada corretamente.
- Após o uso, proceda a limpeza e a esterilização antes de reutilizá-la.
- Só utilize este produto em perfeitas condições, qualquer anormalidade contatar o serviço de assistência técnica RWR.
- Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a indicada pela RWR.
- A não observância destas precauções será considerado mau uso do produto.
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo do calor e umidade.
- As máscaras não são fornecidas esterilizadas, portanto elas devem ser esterilizadas antes de seu uso.

Princípio de Funcionamento

As máscaras se acomodam ao rosto do paciente permitindo a administração de gases ao paciente.

Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Manutenção Preventiva

A obediência às diretrizes hospitalares sobre higiene é de primordial importância. As instruções dos fornecedores de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, também devem ser seguidas no que tange à aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e etc.

Observações:

- Utilizando óxido de etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.
- Não utilize óleo, graxa ou qualquer substância baseada em hidrocarbono em nenhuma parte da máscara.

Descarte

Quando a máscara não estiver mais em condições de uso, destruir e descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminantes.

Cuidados Gerais

- Não utilize as máscaras sem prévio conhecimento.
- Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o indicado nas máscaras. Não fume na área onde o equipamento é utilizado.
- Mantenha as máscaras limpas e em bom estado de conservação, para isso utilize um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro, após a limpeza remova o resíduo com um pano umedecido em água.
- Não utilize álcool, álcool isopropílico, veja, ou produtos similares para limpar as máscaras; estes produtos danificam as peças.
- Em caso de uso em que possa ocorrer contaminação, proceda a desinfecção e/ou esterilização antes de reutilizá-lo, recomendamos que sejam seguidos os procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e manutenção preventiva do hospital.
- Não utilize o equipamento caso haja fissuras ou rachaduras nas partes plásticas.
- Não tente fazer qualquer reparo nas máscaras. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas autorizadas e com peças originais RWR, em caso de mau funcionamento ou vazamento não solucionável com o aperto das conexões suspenda o uso do produto e entre em contato com a assistência técnica da RWR.
- Só utilize este equipamento em perfeitas condições. Qualquer anormalidade contatar imediatamente o serviço de assistência técnica RWR.
- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não a indicada pela RWR.
- A não observância destas precauções será considerada uso indevido do equipamento.
- Armazene o produto em local arejado e ao abrigo de calor e umidade.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao comprador-consumidor do aparelho, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, apresentado no prazo de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da RWR em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constante falha em condições normais de uso.

A presente garantia ficará sem efeito se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, por uso em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Obriga-se a RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda, a prestar os serviços, tanto os gratuitos quanto os remunerados, exclusivamente nas localidades para efetuar consertos. O comprador-consumidor residente em outra localidade será, pois, o único responsável pela despesa de transporte, ida e volta do aparelho à assistência técnica mais próxima.

Se o aparelho for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuamente em vigor até a expiração de seu prazo contando da data da aquisição pelo primeiro comprador-consumidor.

A presente garantia somente será válida se devidamente preenchida pela RWR ou pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho, e não apresentar rasuras ou modificações. É necessário ainda, que este certificado seja apresentado juntamente com a nota fiscal a cada solicitação de prestação de serviços de conserto.

TERMO DE GARANTIA (Deve ser preenchido pelo revendedor no ato da entrega)		
RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.		
Revendedor	_____	
Modelo e nº de fabricação	_____	
Nota Fiscal nº	_____	
Adquirido por	_____	
End:	Nº	_____
Cidade	Est.	Cep: _____

Fabricado e Distribuído no Brasil por:

RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda
Av. do Taboão 3417 - Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09656-000
Tel.: +55 11 3465-5400
E-mail: rwr@rwr.com.br
CNPJ: 08.441.496.0001-40

ARTIGO MÉDICO REUSÁVEL POR UM ÚNICO PACIENTE. QUANDO NÃO ESTIVER MAIS EM CONDIÇÕES DE USO, DESTRUIR E DESCARTAR EM LOCAL PRÓPRIO PARA MATERIAIS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS.

Responsável técnico: Gerson Potonyacz – CREA 5063101610
Prazo de validade: Indeterminado
Registro na ANVISA nº: 80412239005